



# MONDIAN

HELPING PEOPLE SLEEP TIGHT SINCE 2015



## Rengöring och desinfektions- anvisningar

MONDIAN Hygienöverdrag  
VUXEN och BARN modell

### Modell

- Barn
- Vuxen

### Art.Nr.

308 620  
308 621

## **Mondian Hygienöverdrag**

Detta dokument innehåller instruktioner för rengöring, tvätt, samt desinfektion och rekonditionering av Mondian hygienöverdrag både vuxen och barnmodell.

### **Tvättråd, rengöring samt desinfektionsanvisning**

Hygienöverdraget tvättas i en vanlig tvättmaskin och kan torkas i torktumlaren. Kan tvättas i upp till 95 grader vid behov av värmedesinfektion och tål att torktumlas men av klimatekonomiska skäl rekommenderas i första hand tvätt på lägre temperatur och vanlig hängtorkning.

Valen av material gör att hygienöverdraget torkar

snabbt då det inte suger upp mycket vatten.

-  Tvättemperatur 95°C
-  Ej blekning
-  Ej strykning
-  Kan kemtvättas
-  Kan torktumlas

### **Hänvisningar till annan dokumentation**

Förutom denna bruksanvisning finns även, teknisk information och förskrivningsmanual för förskrivare. All dokumentation går att ladda ned i PDF-format ifrån vår hemsida [www.mondian.se](http://www.mondian.se).

Spara denna bruksanvisning så att du alltid har tillgång till den vid behov.



Mondian hygienöverdrag:

Uppfyller läkemedelsverkets föreskrifter LFVS 2003:11  
samt EU direktivet 93/42/EEG  
Uppfyller kraven för flamskydd (ISO EN 12952-1 & -2)



Detta hygienöverdrag är producerat av MONDIAN AB.  
För ytterligare information kontakta oss på: [www.mondian.se](http://www.mondian.se),  
Mail: [info@mondian.se](mailto:info@mondian.se), Kontakt: 031-470210.