

  
MONDIAN



## Rengöring och desinfektions- anvisningar

MONDIAN Tyngdtäcke  
VUXEN och BARN modell

### Modell

<input type="checkbox"/> Barn 3kg	308 510
<input type="checkbox"/> Barn 4kg	308 520
<input type="checkbox"/> 4 kg	308 530
<input type="checkbox"/> 6kg	308 521
<input type="checkbox"/> 8kg	308 522
<input type="checkbox"/> 10 kg	308 523
<input type="checkbox"/> 12 kg	308 524

### Art.Nr.

## Mondian tyngdtäcke

Detta dokument innehåller instruktioner för rengöring, tvätt, samt desinfektion och rekonditionering av Mondian tyngdtäcke både vuxen och barnmodell.

## Tvättråd, rengöring och skötselinstruktioner

Vid normalt användande tvättas Mondian tyngdtäcke i en vanlig hushållstvättmaskin under förutsättning att maskinen klarar en vikt på 6 kg. Använd alltid den medföljande tvättpåsen när du tvättar täcket.

Täcknen som väger över 6kg är delbara och varje del tvättas var för sig.



Tvätttemperatur 60°C  
Mild process



Ej blekning



Ej strykning



Kan kemtvättas



Torktumlas ej

Efter tvätt, häng upp täcket och låt det torka. Valen av material gör att täcket torkar snabbt då det inte suger upp så mycket vatten.

## Desinfektionsanvisning och rekonditionering

Mondian tyngdtäcke klarar minst fem rekonditioneringar utöver normal tvätt och hantering.



Tvätttemperatur för rekonditionering 70°C  
Mild process



Ej blekning



Ej strykning



Kan kemtvättas



Torktumlas ej

Rekonditionering och värdmedesinfektion sker med tvätt av tyngdtäcket i en temperatur på 70°C i mild process, och tvättpåse skall användas. Tvätt bör ske i en kvalitetssäkrad tvättprocess.

Täcken som väger över 6kg är delbara och varje del tvättas var för sig.

## Hänvisningar till annan dokumentation

Förutom denna information finns även bruksanvisning och teknisk information för förskrivare.

## Kontakt och support

Detta tyngdtäcke är producerat av MONDIAN AB.

Vid behov av rådgivning kontakta oss via:

Webbsida: [www.mondian.se](http://www.mondian.se)

email: [support@mondian.se](mailto:support@mondian.se)

Telefon: 031-470210