



MONDIAN

HELPING PEOPLE SLEEP TIGHT SINCE 2015



BRUKSANVISNING

med skötselinstruktioner

Modell

- Barn
- Vuxen

Art.Nr.

308 620
308 621

MONDIAN Hygienöverdrag
BARN och VUXEN

Allmänt

Mondians Hygienöverdrag används för att skydda Mondians tyngtäckten från väta. Hygienöverdraget finns i en vuxenstorlek och en barnstorlek som passar till alla Mondians tyngdtäckten med kedjor i vuxen och barnstorlek.

Användning

Så här sätter du på hygienöverdraget

1. Lägg hygienöverdraget på sängen eller ett annat plant underlag
2. Öppna hela den L-formade dragkedjan.
3. Vik upp den överdelen och placera tyngdtäcket inuti hygienöverdraget.
4. Dra ihop hela dragkedjan
5. Sätt på ett vanligt påslakan ovanpå hygienöverdraget.

Obs! tänk på att hygienöverdraget är gjort i ett tätt material. Var noga med att dragkedjan är stängd om det finns barn i närheten.

Vid användning av hygienöverdrag beakta eventuell kvävningrisk, speciellt i samband med nedsatt motorisk funktion.

Tvättråd och skötselinstruktioner

Hygienöverdraget tvättas i en vanlig tvättmaskin och kan torkas i torktummlaren. Kan tvättas i upp till 95 grader vid behov av desinficering och tål att torktumlas men av klimatekonomiska skäl rekommenderas i första hand tvätt på lägre temperatur och vanlig hängtorkning.

Valen av material gör att hygienöverdraget torkar snabbt då det inte suger upp mycket vatten.



Tvätttemperatur 95°C



Ej blekning



Ej strykning



Kan kemtvättas



Kan torktumlas

Design och materialval

Hygienöverdraget är gjort i ett tätt material som skyddar tyngdtäcket mot väta. Tyget är flamsäkert enligt ISO standard och innehåller inte några flamskyddsmedel eller andra allergiframkallande ämnen.

Hänvisningar till annan dokumentation

Förutom denna bruksanvisning finns även, teknisk information och förskrivningsmanual för förskrivare. All dokumentation går att ladda ned i PDF-format ifrån vår hemsida www.mondian.se.

Spara denna bruksanvisning så att du alltid har tillgång till den vid behov.



MONDIAN

HELPING PEOPLE SLEEP TIGHT SINCE 2015

Mondian hygienöverdrag uppfyller läkemedelsverkets föreskrifter LFVS 2003:11 samt EU direktivet 93/42/EEG. Mondians produkter är registrerade enligt EU-förordning 2017/745 (MDR) och uppfyller krav enligt SFS 1993:584. I enlighet med dessa föreskrifter och direktiv är produkten CE-certifierad.

Uppfyller kraven för flamsäkerhet och är certifierat enligt ISO EN 12952-1 & -2



Detta hygienöverdrag är producerat av MONDIAN AB.
För ytterligare information kontakta oss på: www.mondian.se,
Hultgrens väg 21, 443 38 Lerum
Mail: info@mondian.se, Kontakt: 031-470210.