



## Rengörings- och desinfektionsanvisningar

MONDIAN Tyngdtäcke VUXEN och BARN

MONDIAN Tyngdtäcke med kedjor

Barn 3kg

Barn 4kg

4 kg

6kg

8kg

10 kg

12 kg

14 kg

---

308505-200227



## MONDIAN Tyngdtäcke

Detta dokument innehåller instruktioner för rengöring, tvätt, samt desinfektion och rekonditionering av MONDIAN Tyngdtäcke både vuxen- och barnmodell.

### Tvättråd, rengöring och skötselinstruktioner

Vid normalt användande tvättas MONDIAN Tyngdtäcke i en vanlig hushållstvättmaskin under förutsättning att maskinen klarar en vikt på 6 kg. Använd alltid den medföljande tvättpåsen när du tvättar täcket.

Täckan som väger över 6kg är delbara och varje del tvättas var för sig.

Efter tvätt, häng upp täcket och låt det torka. Valen av material gör att täcket torkar snabbt då det inte suger upp så mycket vatten.



Tvätttemperatur 60°C  
Mild process



Ej blekning



Ej strykning



Kan kemtvättas



Torktumlas ej



## Desinfektionsanvisning och rekonditionering

MONDIAN Tyngdtäcke klarar minst 10 rekonditioneringar utöver normal tvätt och hantering.



Tvätttemperatur för rekonditionering 70°C  
Mild process



Ej blekning



Ej strykning



Kan kemtvättas



Torktumlas ej

Rekonditionering och värmedesinfektion sker med tvätt av tyngdtäcket i en temperatur på 70°C i mild process och tvättpåse skall användas. Tvätt bör ske i en kvalitetssäkrad tvättprocess.

Täcken som väger över 6kg är delbara och varje del rekonditioneras var för sig.

### Hänvisningar till annan dokumentation

Förutom denna information finns även bruksanvisning och teknisk information för förskrivare.

### Kontakt och support

Detta tyngdtäcke är producerat av MONDIAN AB. Vid behov av rådgivning kontakta oss via: Webb sida: [www.mondian.se](http://www.mondian.se)

Email: [support@mondian.se](mailto:support@mondian.se)

Telefon: 031-470210