


MONDIAN



BRUKSANVISNING

med skötselinstruktioner

Modell

3kg

4kg

Art.Nr.

308 560

308 570

MONDIAN Tyngdtäcke M2 (Modell 2)

BARN

Med mjuka kanter



MONDIAN

Så fungerar tyngdtäcket

MONDIAN Tyngdtäcke Modell (M2) barn är ett tyngdtäcke med kedjor som har jämt fördelade tryckpunkter och gör det lättare att slappna av, skapar trygghet och ger en omslutande känsla. Det kan också användas för att lindra oro eller motorisk rastlöshet. Täcket har mjuka kanter. Tyngdtäcket innehåller kedjor som formar sig efter kroppen och den sensoriska upplevelsen från täckets tyngd gör det lättare att släppa automatiserade tankar, spänningar och bidrar till en ökad kroppsuppfattning.

Tyngdtäcket underlättar insomning, minskar risken att vakna upp under natten och gör det lättare att somna om.

Användning

Tyngdtäcket används med påslakan. När barnet provar MONDIAN tyngdtäcke M2 för första gången är det bra att barnet ligger eller sitter i en bekväm position. Lägg tyngdtäcket över hela eller del av kroppen och låt barnet i lugn och ro känna efter hur det känns.

Tyngdtäcket bör användas minst 15 minuter för att kroppen skall få möjlighet att svara på stimulansen och du som förälder bör närvara under den tiden och vara uppmärksam på barnets signaler. Öka därefter användningstiden i den takt som känns bra.

Det kan också användas under dagen då det ger en känsla av välbefinnande och gör det lättare att komma till ro.

MONDIAN tyngdtäcke M2 för barn passar i ett vanligt påslakan i juniorstorlek. Det används istället för barnets

vanliga täcke men kan givetvis även användas tillsammans med barnets ordinarie täcke. Du kan i så fall prova att lägga det under eller över, beroende på vad barnet tycker känns bäst.

Tyngdtäcket kan även användas vid andra tillfällen exempelvis vid vila i sittande, liggande på hela eller delar av kroppen.

Design och materialval

Tyngdtäcket är designat för att det ska upplevas så behagligt som möjligt. Alla material är valda med omsorg för att täcket ska andas och bidra till en behaglig sovmiljö. Tyngdtäcket är sytt i ett slitstarkt tyg och kedjorna är lackerade med en vit pulverlack som inte innehåller några gifter.

Tvättråd och skötselinstruktioner

Tyngdtäcket går bra att tvätta med ett skonsamt program i en vanlig tvättmaskin. Använd alltid den medföljande tvättpåsen när du tvättar täcket.



Tvätttemperatur 60°C
Mild process



Ej blekning



Ej strykning



Kan kemtvättas



Torktumlas ej

Efter tvätt, häng upp täcket och låt det torka. Valen av material gör att täcket torkar snabbt då det inte suger upp så mycket vatten.

Hantering, förvaring och transport

Använd den medföljande väskan vid förvaring och transport av tyngdtäcket.



MONDIAN

- Var uppmärksam på risken att snubbla när tyngtäckets ligger på golvet.
- Bör användas med försiktighet på överkroppen om barnet har svag muskulatur eller nedsatt lungfunktion, rådgör med ansvarig läkare om du är tveksam.
- Vid användning av hygienöverdrag, beakta eventuell kvävningsrisk.

Tillbehör

- Bärväska (ingår)

- Tvättpåse (ingår)
- Hygienöverdrag barn

Hänvisningar till annan dokumentation

Förutom denna bruksanvisning finns även, teknisk information till förskrivare. All dokumentation går att ladda ned i PDF-format ifrån vår hemsida.

Spara denna bruksanvisning så att du alltid har tillgång till den vid behov.

MONDIAN Tyngtdäcke M2 barn uppfyller läkemedelsverkets föreskrifter LFVS 2003:11 samt EU direktivet 93/42/EEG. Mondians produkter är registrerade enligt EU-förordning 2017/745 (MDR) och uppfyller krav enligt SFS 1993:584. I enlighet med dessa föreskrifter och direktiv är produkten CE-certifierad.

Uppfyller kraven för flamsäkerhet och är certifierat enligt ISO EN 12952-1 & -2.



Detta tyngtdäcke är producerat av MONDIAN AB. Ytterligare information finns på vår hemsida www.mondian.se

MONDIAN AB

Jonseredsvägen 19, 433 75 Jonsered

Mail: info@mondian.se, Telefon: 031-470210