



TEKNISK INFORMATION rengöring och desinfektionsanvisningar

För produkterna:

- MONDIAN Tyngdtäcke M2
- MONDIAN Tyngdtäcke Soft
- MONDIAN Tyngdtäcke

(VUXEN och BARN)

Produkter och Artikelnummer

Denna tekniska information gäller följande produkter

- **MONDIAN Tyngdtäcke**
- **MONDIAN Tyngdtäcke M2**
- **MONDIAN Tyngdtäcke Soft**

Dessa refereras gemensamt som Mondians tyngdtäcken.

Mondians tyngdtäcken kedjor och finns i både barn och vuxenstorlek.

MONDIAN Tyngdtäcke och **MONDIAN Tyngdtäcke M2** (modell 2) som väger mer än 6kg är delbara med blixtlås för att kunna tvättas i en normal tvättmaskin.

Vuxenmodell av **MONDIAN Tyngdtäcke Soft** är delbara med blixtlås för att enkelt kunna tvättas i en normal tvättmaskin.

MONDIAN Tyngdtäcke

MONDIAN Tyngdtäcke BARN	Artikelnummer
MONDIAN Tyngdtäcke 3kg	308 310
MONDIAN Tyngdtäcke 4kg	308 320

(Storlek 105x130 cm)

MONDIAN Tyngdtäcke VUXEN	Artikelnummer
MONDIAN Tyngdtäcke 4 kg	308 330
MONDIAN Tyngdtäcke 6 kg	308 321
MONDIAN Tyngdtäcke 8 kg	308 322
MONDIAN Tyngdtäcke 10 kg	308 323
MONDIAN Tyngdtäcke 12 kg	308 324
MONDIAN Tyngdtäcke 14 kg	308 325

(Storlek 150x200 cm)

Tillbehör MONDIAN Tyngdtäcke	Artikelnummer
-------------------------------------	----------------------

Bruksanvisning MONDIAN Tyngdtäcke VUXEN	308 500
Bruksanvisning MONDIAN Tyngdtäcke BARN	308 503
Förvaringsväska	308 623
Tvättpåse	308 622

MONDIAN Tyngdtäcke M2

Tyngdtäcke M2 BARN (M2)	Artikelnummer
MONDIAN Tyngdtäcke 3kg (M2) barn	308 560
MONDIAN Tyngdtäcke 4kg (M2) barn	308 570

(Storlek 105x130 cm)

Tyngdtäcke VUXEN (M2)	Artikelnummer
MONDIAN Tyngdtäcke 4 kg (M2)	308 580
MONDIAN Tyngdtäcke 6 kg (M2)	308 571
MONDIAN Tyngdtäcke 8 kg (M2)	308 572
MONDIAN Tyngdtäcke 10 kg (M2)	308 573
MONDIAN Tyngdtäcke 12 kg (M2)	308 574
MONDIAN Tyngdtäcke 14 kg (M2)	308 575

(Storlek 150x202 cm)

Tillbehör MONDIAN Tyngdtäcke M2	Artikelnummer
Bruksanvisning MONDIAN Tyngdtäcke (M2) VUXEN	308 550
Bruksanvisning MONDIAN Tyngdtäcke (M2) BARN	308 553
Förvaringsväska	308 623
Tvättpåse	308 622

MONDIAN Tyngdtäcke Soft

MONDIAN Tyngdtäcke Soft BARN	Artikelnummer
MONDIAN Tyngdtäcke 3kg Soft barn	308 410
MONDIAN Tyngdtäcke 4kg Soft barn	308 420

(Storlek 105x130 cm)

MONDIAN Tyngdtäcke Soft VUXEN delbara	Artikelnummer
MONDIAN Tyngdtäcke 4 kg Soft	308 430
MONDIAN Tyngdtäcke 6 kg Soft	308 421
MONDIAN Tyngdtäcke 8 kg Soft	308 422
MONDIAN Tyngdtäcke 10 kg Soft	308 423
MONDIAN Tyngdtäcke 12 kg Soft	308 424

(Storlek 150x202 cm)

Tillbehör MONDIAN Tyngdtäcke Soft	Artikelnummer
Bruksanvisning MONDIAN Tyngdtäcke Soft vuxen	308 555
Bruksanvisning MONDIAN Tyngdtäcke Soft BARN	308 557
Förvaringsväska	308 624
Tvättpåse	308 622

MONDIAN Tyngdtäcke

MONDIAN Tyngdtäcke BARN	Artikelnummer
MONDIAN Tyngdtäcke 3kg	308 510
MONDIAN Tyngdtäcke 4kg	308 520

(Storlek 105x130 cm)

MONDIAN Tyngdtäcke VUXEN	Artikelnummer
MONDIAN Tyngdtäcke 4 kg	308 530
MONDIAN Tyngdtäcke 6 kg	308 521
MONDIAN Tyngdtäcke 8 kg	308 522
MONDIAN Tyngdtäcke 10 kg	308 523
MONDIAN Tyngdtäcke 12 kg	308 524
MONDIAN Tyngdtäcke 14 kg	308 525

(Storlek 150x200 cm)

Tillbehör MONDIAN Tyngdtäcke	Artikelnummer
Bruksanvisning MONDIAN Tyngdtäcke VUXEN	308 500
Bruksanvisning MONDIAN Tyngdtäcke BARN	308 503
Förvaringsväska	308 623
Tvättpåse	308 622

Användning

Mondians tyngdtäcken hjälper användaren att slappna av, skapar trygghet och ger en omslutande känsla. Det kan användas för att lindra oro, motorisk rastlöshet och sömnsvårigheter.

Mondians tyngdtäcken innehåller kedjor som formar sig efter kroppen och den sensoriska upplevelsen av tyngden bidrar till en ökad kroppsuppfattning. Tyngdtäcket används med påslakan.

För att uppnå en maximalt omslutande känsla kan användaren placera täcket så att så många av kedjorna som möjligt har kontakt med kroppen. Eftersom tyngdtäcket är vadderat på den ena sidan kan den sensoriska stimulansen varieras beroende på vilken sida som vänds mot kroppen.

Mondians tyngdtäcken passar i ett vanligt påslakan.

Det kan användas istället för- eller i kombination med ett vanligt täcke. Tyngdtäcket kan även användas vid andra tillfällen exempelvis vid vila i sittande, liggande på hela- eller delar av kroppen.

Design och materialval

Tyngdtäcket är designat för att det ska upplevas så behagligt som möjligt. Alla material är valda med omsorg för att bidra till en behaglig sovmiljö. Det är sytt i ett flamsäkert tyg. Kedjorna är högkvalitativa rostfria kedjor och är lackerade med en vit pulverlack som inte innehåller några gifter, och minskar ljudet från kedjorna vid användning. Kedjorna är insydda i kanaler och fastsatta i vävda band.

Tvättråd, rengöring och skötselinstruktioner

Mondians tyngdtäcken tvättas i en vanlig hushållstvättmaskin under förutsättning att maskinen klarar en vikt på 6 kg. Använd alltid den medföljande tvättpåsen när du tvättar täcket.

MONDIAN Tyngdtäcke Soft är delbara i vuxenstorlek och varje del tvättas var för sig.

MONDIAN Tyngdtäcke och MONDIAN Tyngdtäcke M2 som väger över 6kg är delbara och varje del tvättas var för sig.



Tvätttemperatur 60°C
Mild process



Ej blekning



Ej strykning



Kan kemtvättas



Torktumlas ej

Efter tvätt, häng upp täcket och låt det torka. Valen av material gör att täcket torkar snabbt då det inte suger upp så mycket vatten. Kan även torkas i torkskåp på låg temperatur.

Täcket krymper cirka 2,7% på längden.

Desinfektionsanvisning och rekonditionering

Mondians tyngdtäcken klarar minst 10 rekonditioneringar utöver normal tvätt och hantering.



Tvätttemperatur för rekonditionering 70°C
Mild process



Ej blekning



Ej strykning



Kan kemtvättas



Torktumlas ej

Rekonditionering och värmedesinfektion sker med tvätt av tyngdtäcket i en temperatur på 70°C i mild process, och tvättpåse skall användas. Tvätt bör ske i en kvalitetssäkrad tvättprocess.

För de tyngdtäcken som är delbara, skall varje del tvättas var för sig.

Hantering, förvaring och transport

För att vika ihop ett tyngdtäcke, vik in ca 50 cm utefter ena långsidan. Vik över den andra långsidan och Rulla ihop det ca 30 cm åt gången.




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


Använd den medföljande väskan vid förvaring och transport av tyngdtäcket

- Var uppmärksam på risken att snubbla om tyngdtäcket ligger på golvet.
- Bör användas med försiktighet på överkroppen vid svag muskulatur eller nedsatt lungfunktion. Rådgör med ansvarig läkare om du är tveksam.
- Sätt gärna upp ett knä i sängen för få en bättre arbetsställning vid bäddning.
- Vid användning av hygienöverdrag, beakta eventuell kvävningsrisk.

Färgkodning av täckesdelar

MONDIAN Tyngdtäcke, Soft och MONDIAN Tyngdtäcke M2 har en färgkodning på varje täckesdel när täcket är delbart.

Detta för att minska risken för förväxling när man tvättar flera täcken som är delade. Färgvalen är gjorda så att även personer med de vanligaste formerna av färgblindhet kan urskilja färgerna.

Färgkodning		Vikt
Gammelrosa		4 kg
Gul		6 kg
Kornblå/Mörkblå		8 kg
Ljusblå		10 kg
Grön		12 kg
Beige		14 kg

Visuell besiktning

Kontrollera att manual är korrekt och läsbar. Om inte bör manualen ersättas.

Kontrollera tyngdtäcket visuellt. Om det finns synliga skador bör produkten åtgärdas.

Om tvättpåsen är sönder eller saknas bör den ersättas.

Materialkomposition

Mondians tyngdtäcken med kedjor innehåller inga gifter eller allergiframkallande kemikalier.

Alla textilier är certifierade enligt Öko-Tex® 100, vilket omfattar att textilierna inte innehåller enligt lag förbjudna ämnen och reglerade substanser, allmänt kända riskabla ämnen samt parametrar för förbyggande friskvård, och består till största delen av polyester. I sin helhet är kraven betydligt strängare än befintliga nationella lagstiftningar.

Mondians tyngdtäcken innehåller inga flamskyddsmedel.

Kedjorna är gjorda i högkvalitativt stål och är lackerade med en vit pulverlack som inte innehåller gifter eller allergiframkallande ämnen. EU förordningen EG 1907/2006 (REACH) har tagits i beaktande.

Märkning och spårbarhet

Alla producerade tyngdtäcken har märkning med MONDIAN företagsnamn, tvättråd, artikelnummer, unikt serienummer samt produktionsdatum med år och månad (ÅÅ/MM).

Hänvisningar till annan dokumentation

Förutom denna tekniska information finns även bruksanvisning och förskrivningsmanual för förskrivare.

Spara detta tekniska informationsblad så att du alltid har tillgång till det vid behov.

Reservdelar till MONDIAN Tyngdtäcke

Produktnamn	Artikelnummer	Storlek
Förvaringsväska MONDIAN Tyngdtäcke och MONDIAN Tyngdtäcke M2	308 623	Storlek 60x30x25 cm (LxBxH)
Förvaringsväska MONDIAN Tyngdtäcke Soft	308 624	Storlek 60x30x27cm
Tvättpåse Passar alla Mondian tyngdtäcken	308 622	Storlek 100cm x 110 cm

Tillbehör till Mondians tyngdtäcken

Produktnamn	Artikelnummer	Storlek
Hygienöverdrag barn	308 620	Storlek 105 cm x 130 cm
Hygienöverdrag vuxen	308 621	Storlek 150 cm x 200 cm

Passar alla Mondian tyngdtäcken, barn respektive vuxen.

Standarder och certifieringar

Mondians tyngdtäcken med kedjor är registrerade medicintekniska produkter som uppfyller läkemedelsverkets föreskrifter LFVS 2003:11, lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584 samt EU direktivet 93/42/EEG.

MONDIAN AB är registrerad som en medicinteknisk aktör och tillverkare av CE-märkta produkter enligt EU-förordning 2017/745 (MDR).

Mondians nuvarande produkter är av typen: V: Medical devices – various, och riskklass: MDR klass I

Mondians tyngdtäcken uppfyller kraven för flamsäkerhet och är certifierade enligt ISO EN 12952-1 & -2 av ett ackrediterat testinstitut.



Kontakt och support

Detta tyngdtäcke är producerat av
MONDIAN AB, Jonseredsvägen 19, 433 75 Jonsered

Vid behov av rådgivning kontakta oss via:

Webbsida: www.mondian.se

Email: support@mondian.se

Telefon: 031-470210