


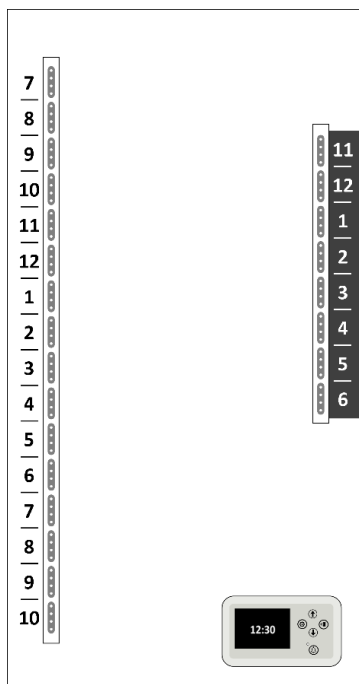

BRUKSANVISNING

med skötselinstruktioner och teknisk information

MONDIAN Planner

IFU: Mondian Planner Date: 2025-03-11

Gäller från s/n 00100

Artikelnummer

308 100 (24h)

308 101 (12h)




Innehållsförteckning

Översikt på produkten	4
Introduktion	5
Avsedd användning.....	5
Viktig information om produkten	6
Installation.....	6
Upphängning på vägg.....	6
Montering på stativ.....	8
Igångsättning.....	8
Så fungerar MONDIAN Planner.....	9
Tidsvisning (normalläge)	9
Tidsstapel	10
Menysystemet.....	11
Knappsats	11
Menyfunktioner	13
Ställ alarm	13
Ställ in ljusstyrka.....	15
Ställ in ljudnivå	16
Versions information.....	18
Tangentbordslås.....	18
ställ in tid.....	19
Ställ in datum	20
Konfigurationsmeny.....	21

MONDIAN

Inställning av språk.....	22
Inställning av datumformat.....	22
Inställning av tidsformat	23
Inställning av sommartid.....	24
Fabriksinställning	25
Handhavande	26
Skötselinstruktioner	26
Rekonditionering-, och rengöringsanvisning	26
Visuell inspektion	27
Produktmärkning	28
Teknisk dokumentation	30
Material.....	31
Produktreferenser.....	32
MONDIAN Planner	32
Tillbehör	32
Reservdelar	33
Förvaring och transport	34
Risker.....	34
Hänvisningar till annan dokumentation	35
Information om föreskrifter.....	35
Återvinning.....	36

Översikt på produkten

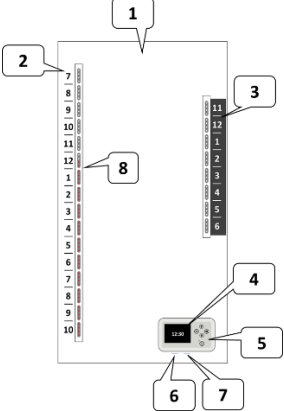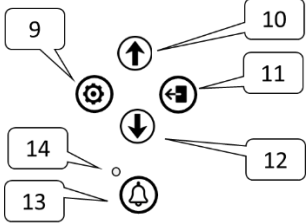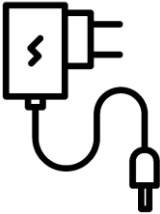	1. Skrivyta ("white board") 2. Tids-stapel dag 3. Tids-stapel natt 4. Display 5. Knappsats 6. Strömkontakt 7. Alarmljudutgång 8. Aktuell tid i form av en tids-stapel
	<u>Knappsats</u> 9. Program-knapp 10. Upp 11. Återgå 12. Ned 13. Användarknapp alarm 14. Alarm lysdiod
	Får endast användas med adapter tillhörande produkten

12:30	Tidsvisning (normalläge)
       	Huvudmenyn Den svarta rektangeln indikerar nuvarande val

Introduktion

Avsedd användning

MONDIAN Planner avsedd att används för att ge struktur i vardagen för personer med kognitiva svårigheter.

Det är ett hjälpmedel som visualiserar en dag eller ett dygn och visar tidpunkt på dygnet. Aktiviteter kan visas genom text- eller bildstöd, och vid behov larma när aktiviteten inträffar.


MONDIAN Planner är avsedd att användas i normal hemmamiljö, där den kan användas av både operatör och användaren

Viktig information om produkten

- Produkten innehåller elektriska komponenter, och skall enbart servas av behörig personal
- I det fall allvarliga incidenter upptäcks, skall dessa omgående rapporteras till tillverkaren samt även berörda myndigheter.
- Placera inte flera enheter på varandra, då dessa kan skadas
- Använd enbart tillhörande strömadapter, kablage och andra tillbehör som tillhör produkten

Installation

Upphängning på vägg

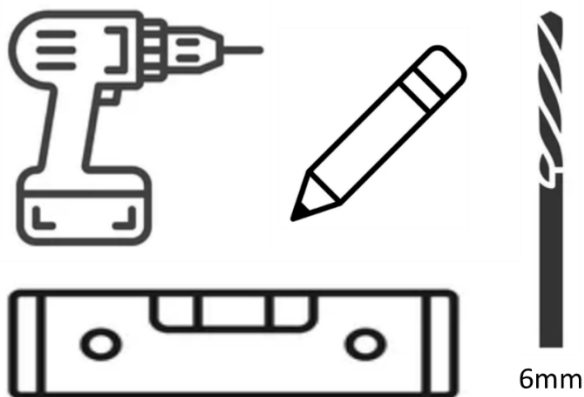

+

Monteringsmall MONDIAN Planner

+

För att installera behövs en bormaskin, penna, vattenpass, skruvmejsel samt medföljande monteringsmall, skruv och universalplugg. Viktigt att du har nödvändiga kunskaper för att borra, montera skruvar och hänga MONDIAN Planner enligt instruktionen, för att undvika risk att den kan lossna från väggen.



Viktigt att installation sker på ett korrekt sätt, annars finns det risk att produkten kan ramla ner och skada någon.

Innan-du-börjar:

1. Hitta en lämplig placering av tavlan, där både brukare och operatör kan se displayen, och operatören även använda knappsats.
2. Se till att du har ett strömuttag tillräckligt nära, eller använd en förlängningssladd.



Undvik att strömsladden hamnar där folk behöver gå, eftersom det kan innebära snubbelrisk, och tavlan kan ramla ner och skada någon.

Steg-för-steg

1. Använd den medföljande monteringsmallen för att märka ut var borrhålen skall vara. Använd vattenpass för att se till att hålen kommer i våg. Märk ut hålen med pennan.
2. Borra hålen, med ett borr som är 6mm. Är det en betongvägg kan du behöva använda betongborr.

3. Montera universalpluggen. Skruva inte in skruvarna helt, utan låt 5mm av skruven sticka ut utanför hålet, så att det går att hänga upp tavlan.



Det är viktigt att du använder universalpluggen som följer med förpackningen, standard plastplugg lämpar sig inte för uppsättning av produkten på gipsskiva.

4. Försäkra dig om att skruvarna sitter bra.
5. Häng upp produkten på skruvarna. Försäkra dig om att skruvarna går ända in i den smalare delen av upphängningsslitsen.

Montering på stativ

Om du inte vill montera MONDIAN Planner på väggen kan man också använda ett bordsstativ. Bordsstativet är ett tillbehör, som beställs separat.

Föra att montera MONDIAN Planner på stativet, montera stativet enligt bruksanvisning som följer med stativet.

Ställ stativet på ett stabilt bord, och häng upp MONDIAN Planner på de hängare som avses.

Igångsättning

Anslut strömadaptern till strömkontakten (6) som sitter under displayen. Anslut sedan strömadaptern till vägguttaget.

Produkten kommer normalt med rätt tid och datum, men bör verifieras innan produkten börjar att användas

Så fungerar MONDIAN Planner


MONDIAN Planner är ett tidshjälpmedel, som hjälper brukare som har svårt med tidsuppfattning.

Produkten består av tre huvuddelar som interagerar med brukaren; en display som visar tiden, samt meny-information; två tids-staplar som visar kvarvarande tid för dag respektive natt; en white-board yta, där man kan knyta bilder och text till programmerade alarm.


Tidsvisning (normalläge)

Efter man startar produkten, påbörjas visning av tid.

Olåst

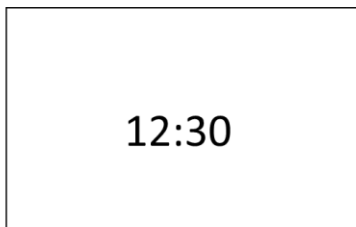


Låst

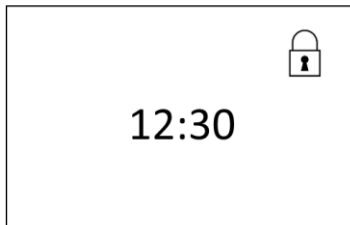

Om 12 timmarsformat är valt, visas även symbolen am/pm, förmiddag/eftermiddag under tiden. Har man valt automatlås syns ett hänglås till höger överkant.

Tidsstapel

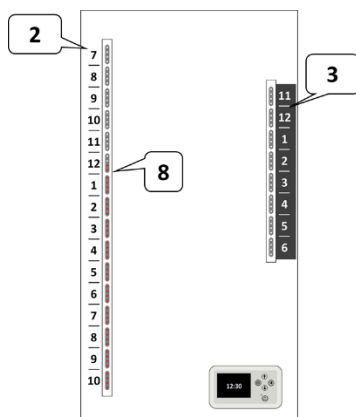

Produkten har två visuella tids-staplar, en för dag (2) och en för natt (3). Dessa delar in dygnet is 15 minuters intervaller, och fyra lampor motsvarar en timme. Enligt fabriksinställningarna börjar dagen klockan 07:00 och slutar 22:59, medan natt börjar 23:00 till 06:59.


Tids-staplarna visar kvarvarande tid av dag respektive natt. I exemplet ovan är klockan 12:30, där tids-stapeln (8) visar resterande tid på dagen. Detta ger brukaren en uppfattning av resterande tid kvar av dagen.

För att särskilja dag och natt, lyser tids-staplarna med olika färger. Tids-stapeln för dag har röda lampor, tids-stapeln för natt har blå lampor.

Man kan även justera om man vill ha 12 eller 24 timmarsvisning. Om man ändrar från standard tidsvisning kan man även justera siffrorna bredvid staplarna med hjälp av tillbehöret magnetremsor till tidsstapel.

Under programmering av alarm samt visning av alarm, visas aktiva alarm med ett fast sken, detta beskrivs mer detaljerat i ställ alarm.

Menysystemet

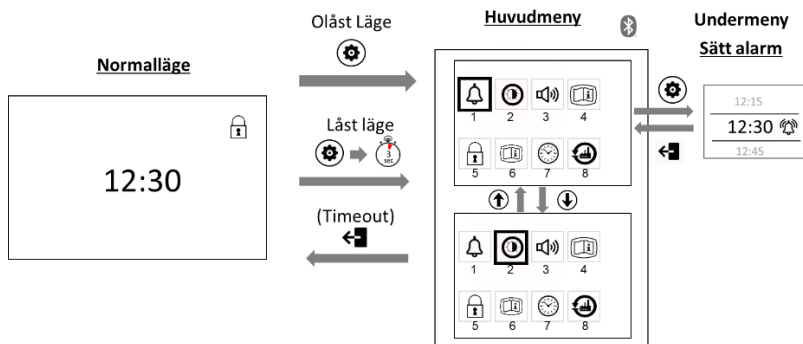

Figur 1 Översikt meny-system

Produktens menysystem är designat så att operatören på ett enkelt sätt kan se och justera alla inställningar med hjälp av display och knappsats.

Man navigerar menysystemet med knappsatsen.

Knappsats

Knappsats används för att kontrollera enheten, och hantera inmatning:




Program-knapp används för komma in i meny, samt också för att acceptera inmatning, samt växla alarm.

	Upp-pil används för att navigera menyer, höja eller välja föregående tid, eller föregående val
	Ned-pil används för att navigera menyer, sänka eller välja nästa tid, eller nästa val
	Återgå-knappen lämnar funktionen, samt om det har varit för förändring, sparas information
	Alarmknappen (13) är väl synlig på framsidan av produkten, för att brukaren lätt skall kunna nå knappen. Den har följande flera funktioner • När ett aktivt larm indikerar, kan brukaren trycka på alarmknappen för att kvittera larmet. • Vid programmering av larm, kan man använda denna för att aktivera/av-aktivera larm.

Menyfunktioner

Ställ alarm

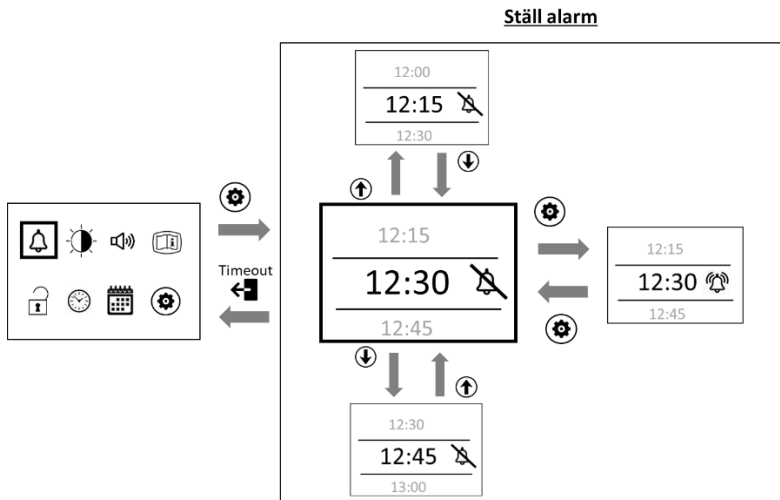

Funktionen ställ alarm () i huvudmenyn ställer in alarm. Det går att ställa in ett alarm för varje 15 minuters-intervall under hela dygnet.

Läs hur du navigerar menyn i sektionen Menysystemet

Så här gör du:

1. Från huvudmenyn välj ställ alarm ()
2. Väl inne i ställ alarm visas alla ställda alarm på tidsstaplarna dag och natt, där ett fast sken indikerar att ett alarm är aktiverat.
3. Tryck på upp och ned knapparna för att välja klockslag för alarmet som du vill ställa in.


4. Den aktuella tidpunkten för alarmet visas i mitten med större text, och ett alarm åt gången, där klockslaget med större text-storlek är nuvarande alarm, samt symbolen till höger är status på alarmet.
 - () - Alarm är avstängt
 - () - Alarm är aktivt
5. För att programmera larmet på vald tidpunkt tryck åter igen på programknappen så syns det att alarmet har aktiverats.
6. Tryck på återgå-knappen för att spara alarmet och återgå till huvudmenyn.
7. För att lämna huvudmenyn, tryck återgå-knappen

I det fallet tidsinställningen är satt till 12 timmarsformat, visas symbolen "am" som förmiddag, och "pm" för eftermiddag.



Figur 2 Exempel på 12 timmarsvisning av alarm

Status på alarm:

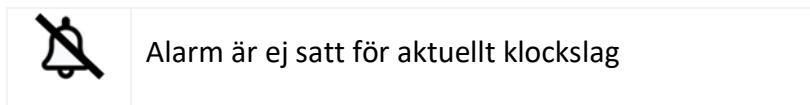


	Alarm är satt för aktuellt klockslag
am/pm	För 12-timmars inställning am är förmiddag pm är eftermiddag

Beskrivning av funktionsknappar i sätt alarm:

	Upp-pil visar föregående tidpunkt
	Ned-pil visar nästkommande tidpunkt
	Program-knapp växlar status på alarm
	Återgå-knappen lämnar funktionen, med det satta alarmen.

Ställ in ljusstyrka

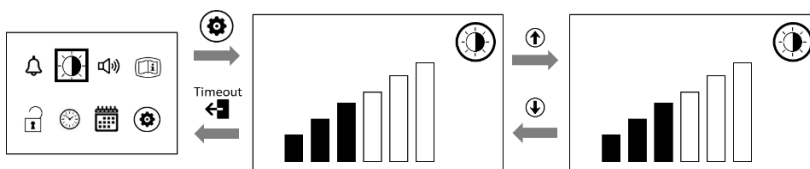

Funktionen ljusstyrka ställer in ljusstyrka på tidsstaplar, samt även display.

Läs hur du navigerar menyn i sektionen Menysystemet.


Så här gör du:

1. Tryck på programknappen med kugghjulet för att öppna menyn.
2. I huvudmenyn, växla mellan menyval genom att använda pil-upp och pil-ned knapparna
3. Välj symbolen (☾) för ställ in ljusstyrka med programknappen
4. Använd pil-upp och pil-nedknapparna för att ställa in lämplig ljusstyrka
5. Tryck på återgåknappen eller programknappen för att återgå till huvudmenyn
6. Tryck på återgåknappen för att återgå i normalläge

Beskrivning av funktionsknappar i ställ in ljusstyrka:

	Ökar ljusstyrkan på ljusstapeln
	Minskar ljusstyrkan på ljusstapeln
	Program-knapp samt återgå sparar ljusstyrka och återgår till huvudmenyn.
Timeout	Timeout sparar ljusstyrka och återgår till normalläge.

Ställ in ljudnivå

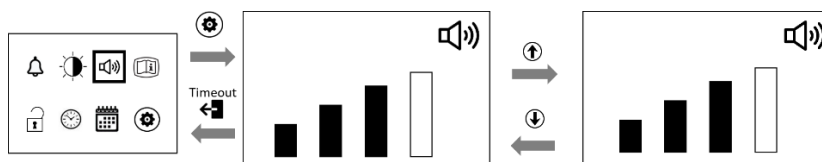

Med funktionen ställa ljudnivå, justeras ljudvolymen för alarmer.

Läs hur du navigerar menyn i sektionen Menysystemet.

Så här gör du:

1. Tryck på programknappen med kugghjulet för att öppna menyn.
2. I huvudmenyn, växla mellan inställningar genom att använda pil-upp och pil-ned knapparna
3. Välj symbolen (🔊) för ställ in ljudvolym med programknappen
4. Använd pil-upp och pil-nedknapparna för att ställa in önskad ljudvolym
5. Tryck på återgåknappen eller programknappen för att återgå till huvudmenyn
6. Tryck på återgåknappen för att återgå i normalläge

Beskrivning av funktionsknappar i ställ in ljudnivå:



Höjer ljudnivå på alarmsignalen




Minskar ljudnivå på alarmsignalen



Sparar och återgår till huvudmenyn

Timeout Sparar värde, och återgår till normalläge


Versions information

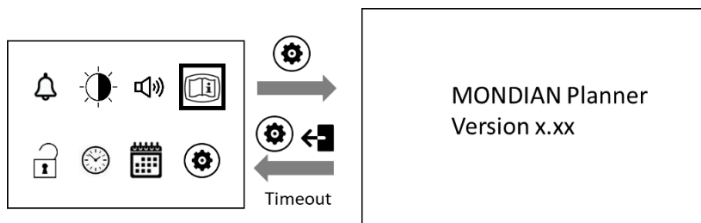


Versionsinformation () visar information om produkten.

Tangentbordslås

Lås tangentbord

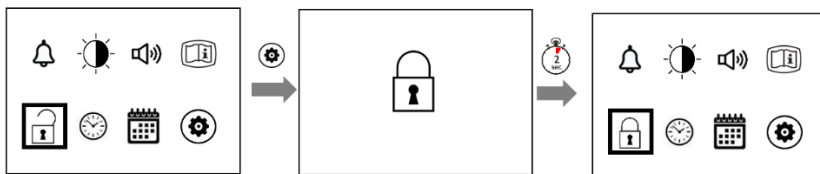

Lås upp tangentbord

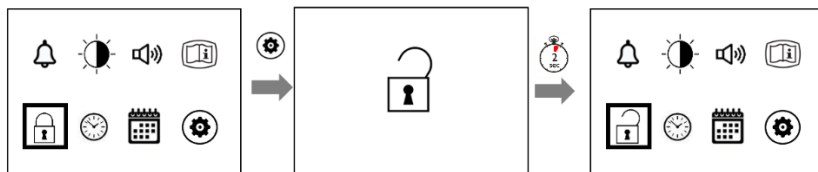

Funktionen Lås enhet/lås upp enhet ställer in låsmekanism för att komma in i meny-systemet. Aktivt läge visas i menyn.

Läs hur du hanterar menyn i sektion Menysystemet.


Så här gör du:

1. Tryck på programknappen för att öppna huvudmenyn.

2. I huvudmenyn, växla mellan inställningar genom att använda pil-upp och pil-ned knapparna
3. Välj symbolen för hänglåset (🔒) med programknappen och använd programknappen för att växla mellan aktivering och inaktivering av knapplåset
4. För att spara inställningen och återgå till normalläge tryck på återgå

Om knapplåset är aktiverat så visas symbolen för ett hänglås i displayen, vid normalläge

Ställ in tid

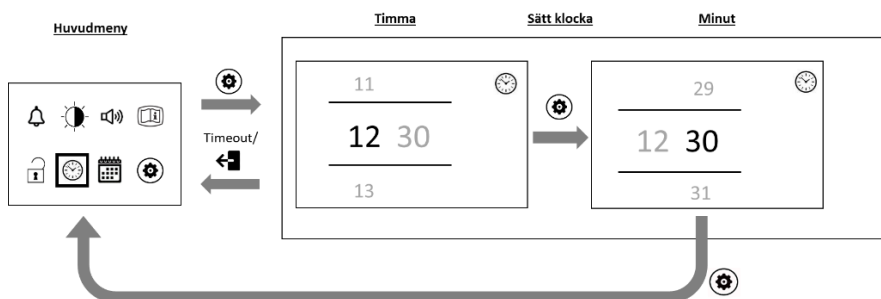

Funktionen ställ in klocka ställer in aktuell tid på enheten.

Läs hur du navigerar menyn i sektionen Menysystemet.


Så här gör du:

1. I huvudmenyn, välj ställ in tid (🕒) med programknappen

2. Du får då valet att ställa in timmar. Använd upp/nedpilar för att minska/öka timmar. När du ställt in timmar, trycker du på program-knapp för att spara.
3. Markeringen flyttas då automatiskt till inställningen av minuter. Använd upp/nedpilar för att ställa in önskad tid. För att spara tryck på programknappen så sparas inställningen och man återgår till huvudmenyn.
4. Om du trycker återgå eller får timeout, avbryts den pågående inställningen. Om du redan ställt in timmar, så sparas enbart den inställningen.
5. Om 12 timmarsvisning är inställd, visas även en am/pm symbol

	För 12 timmarsinställning
am/pm	am är förmiddag pm är eftermiddag

Ställ in datum

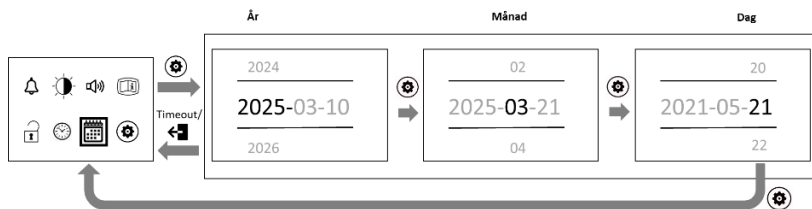


Beskrivning ställ in datum:

Detta ställer in datum på enheten, ordningen av datum varierar beroende på inställningar på datuminställning.

När man kommer in i undermenyn ställ in datum, väljs första kolumnen.

I exemplet på bilden är det år-månad-dag (ÅÅÅÅ-MM-DD). Man väljer då rätt år genom att använda upp/ned pilarna. När man valt rätt alternativ, trycker man på programknappen, och då markeras måndag, processen repeteras därefter för att välja månad och dag. När man är nöjd trycker man antingen programknappen eller exit-knappen, och datum sparas.

Konfigurationsmeny

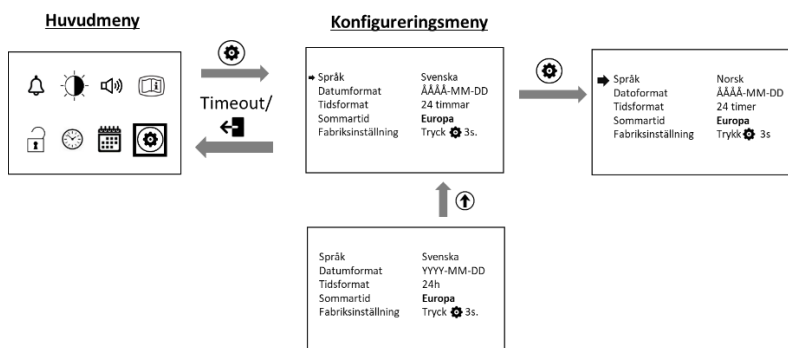

Så här gör du: Från huvudmenyn välj konfigureringsmenyn (⚙️), och tryck program-knapp (⚙️). Inne i **konfigureringsmenyn** använder du pilarna att navigera dig upp eller ner, en pil visar vilken konfiguration som är vald


För att ändra ett val, trycker man på program-knapp (⚙️).

Bilden nedan visar vilka val som finns för varje inställning, valen i fet stil är standardinställningar för svenska marknaden, och man växlar val genom att trycka på programknappen.


Inställning av språk

Börja med att läsa sektion konfigurationsmeny.

Använd pilknapparna för att välja Språk.

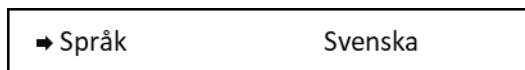

I menyvalet språk, och när man trycker programknappen (⊗), byter enheten språk, som bilden nedan visar

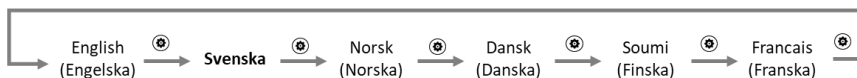


Om man trycker 6 gånger på programknappen, kommer man tillbaka till ursprungligt språk.

Enheten sparar automatiskt ändringen

Inställning av datumformat

Börja med att läsa sektion konfigurationsmeny.

Använd pilknapparna för att välja Datumformat.

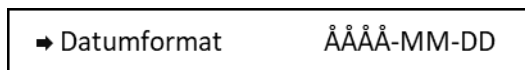

Datumformat är hur man matar in och enheten visar datum

När man trycker programknappen (⊗), byter enheten datumformat, som bilden nedan visar:



Enheten sparar automatiskt ändringen

De olika visningsformaten av datum:

ÅÅÅÅ-MM-DD	DD.MM.ÅÅÅÅ
2024	20
2025-03-21	21.03.2025
2026	22

MM/DD/ÅÅÅÅ	DD/MM/ÅÅÅÅ
02	20
03/21/2025	21/03/2025
04	22

Där:

- **ÅÅÅÅ**: firsiffrigt årtal, t.ex. **2025**
- **MM**: Månad, mars är **03**
- **DD**: Dag, t.ex. **21**

Inställning av tidsformat

Börja med att läsa sektion konfigurationsmeny.

Använd pilknapparna för att välja Tidsformat.

➡ Tidsformat	24 timmar
--------------	-----------

Tidsformat:

- 24 timmar: Tid från 00:00 – 23:59

- 12 timmar: Tid från 00:00 – 12:00, med am/pm, där am är förmiddag, samt pm är eftermiddag.

Man växlar genom att trycka på program-knappen (⚙️), som bilden nedan visar:



Enheten sparar automatiskt ändringen

Inställning av sommartid

Börja med att läsa sektion konfigurationsmeny.

Använd pilknapparna för att välja Sommartid.



Det finns tre val för sommartid:


- **Europa** –Sommartid, som används Europa, även i Norden (Sverige, Norge, Danmark)
- **US** - Nordamerikansk sommartid (DST)
- **Av** – Sommartid är **avaktiverad**

Man växlar genom att trycka på program-knappen (⚙️)



Enheten sparar automatiskt ändringen

Fabriksinställning

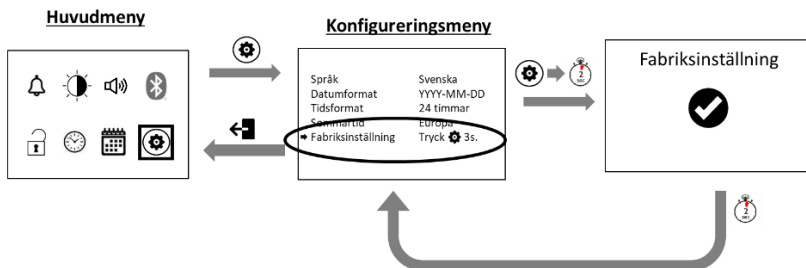

Fabriksinställning ställer in produkten i det läge produkten levererades. Detta innebär att alla alarm återställs. Den ställer även in standardinställningar för språk datumformat, tidsformat, samt sommartid.

Datum och Tid ändras inte.

Så här gör du: Från huvudmenyn välj konfigureringsmenyn och tryck program-knapp (⚙️). Inne i **konfigureringsmenyn** trycker du på Ned-pil tills du kommer till valet

Fabriksinställning.

Sedan genom att hålla nere program-knapp i 3 sekunder återställs alla inställningar till fabriksinställningar.

För att visa att fabriksåterställning har skett, visas en bockmarkering (✓) i två sekunder, och enheten återgår sedan till konfigureringsmenyn, och de nya inställningarna har laddats.

Notera att Fabriksinställningar skiljer sig från produkter levererade i olika länder, samt mellan 12-timmar och 24-timmar version

Handhavande

Använd enbart whiteboardpennor för att skriva på MONDIAN Planner.

Skötselinstruktioner

MONDIAN Planner kan rengöras med en lätt fuktad trasa på white board sidan. Spruta inte direkt på produkten.



Tänk på att detta är en elektrisk apparat. När du använder fuktad trasa, dra ut strömadaptern.

I det fall strömadaptern torkas av, måste den torka i minst 24 timmar.

Om någon del ser ut att vara skadad, koppla ur produkten och kontakta din förskrivare eller Mondian.

Rekonditionering-, och rengöringsanvisning

- För att sudda bort det som skrivits med whiteboardpennor använd den medföljande mikrofiberduken. Produkten klarar rengöring med på marknaden vanligen förekommande milda rengöringsmedel. Vid behov kan man använda en fuktig trasa men koppla då först ur nätadaptern från strömuttaget. Om du använder en fuktad trasa var då noga med att eftertorka produkten med en torr trasa så att produkten är torr innan du åter kopplar in

nätadaptern. Detta gäller även vid desinficering med ytdesinfektion.



Håll aldrig handsprit eller vatten direkt på produkten, utan fukta en trasa för att desinficera eller rengöra produkten.

- Om det finns märken från whiteboardpennorna som är svåra att få bort kan man prova att skriva över märket med en whiteboardpenna och därefter sudda med mikrofiberduken.
- För att återställa enheten till fabriksinställning (så som den levereras), gör en fabriksinställning, det rensar all information i enheten, förutom tid och datum.
- Gör en visuell inspektion av enheten
- Ställ in datum och tid
- Komplettera med ett rekonditioneringskit.

Visuell inspektion

För att säkerställa att enheten fungerar korrekt, bör följande iakttas:


- Att det är rätt strömadapter, att strömadapterns stift inte är böjda, eller på annat sätt ser felaktiga ut, att kabeln inte är skadad.
- Att huvudenheten inte har synliga skador, eller lösa delar. Att led-listerna är intakt, och inte är skadade.
- Att etikett på baksidan är intakt och läsbar

- Att bruksanvisning finns och är korrekt




Om någon del ser ut att vara skadad, koppla ur produkten och kontakta din förskrivare eller Mondian.

Produktmärkning

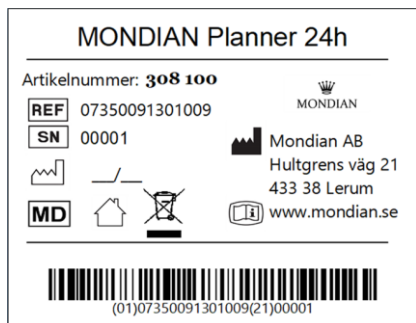

Figur 3 Etikett till MONDIAN Planner 24 timmar (exempel)

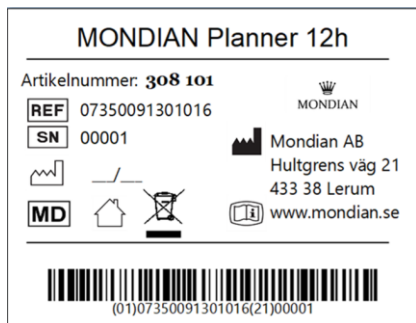

Figur 4 Etikett till MONDIAN Planner 12 timmar (exempel)

Etiketten innehåller följande information;

	Medicinteknisk produkt
Artikelnummer	Artikelnumret som används för beställningar
	UDI-DI på produkten
	Serienummer (SN)
	Tillverknings datum
	CE symbol som visar att produkten uppfyller alla regulatoriska krav i EU för medicintekniska produkter klass 1
	MONDIAN AB är tillverkare
	För inomhusbruk
	Hemsida, där man kan hitta bruksanvisning
	Produkten innehåller elektronik, och skall lämnas till återvinningsstation.



Figur 5 Märkning Strömadapter



Figur 6 QR-kod till elektronisk bruksanvisning

Teknisk dokumentation

Mått (H x B x D) mm	764x404x58mm (HxBxD)
Produktvikt	3.3kg
Strömadapter	Inspänning: 110-230VAC Utspänning: 9VDC, 1.1A
Klocka noggrannhet	+/- 5ppm
Temperaturområde	10-40°C
Basic Safety	ISO/IEC 60601
Skydd mot statisk elektricitet	IEC 60601-1-2 +/-8kv Contact discharge +/-15kV Air discharge
Usability	IEC 62366, IEC 60601-1-6
Ljudsignal	73 dBA (vid 1 meter)
Knappar	Membranknappar tryck <7N

Electromagnetic emissions	IEC 60601-2 (CSPR 11 Group 1) 10V/m
Electromagnetic Immunity	IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8

Material

Produkten är baserat kring ett koncept med en magnetisk white-board skiva med en aluminiumram, och en baseenhet som innehåller elektronik, display, tangentbord, buzzer. Sedan har produkten en ledlist för nedräkning dag, samt en ledlist för nedräkning natt.

Enheten har en realtidsklocka med ett internt batteri, som har en livslängd på 10år.

Produktreferenser

MONDIAN Planner

Artikel	Art.Nr.	GTIN
MONDIAN Planner 24h	308 100	07350091301009
MONDIAN Planner 12h	308 101	07350091301016

Detta medföljer produkten:

- MONDIAN Planner
- Strömadapter
- Bruksanvisning
- Mall för väggfästning
- Monterings-kit (Skruvset med plugg)
- White board pennor 3 stycken
- Mikrofiberduk

Tillbehör

Rekonditionerings-Kit	308 130	07350091301306
Bordsställ	308 131	07350091301313
Genomskinlig dörr, skydd av skrivyta	308 132	07350091301320
Anpassnings-Kit	308 133	07350091301337

Magnetband 24 timmarsvisning	308 134	07350091301344
Magnetband 12 timmarsvisning	308 135	07350091301351
Magneter med veckodagar	308 136	07350091301368
Magneter med månader	308 137	07350091301375
Magneter med självhäftande yta	308 138	07350091301382

Reservdelar

Artikel	Art.Nr.	GTIN
Adapter	308 105	07350091301054
Pennor	308 106	07350091301061
Mikrofiber duk	308 107	07350091301078
Bas-enhet	308 108	07350091301085
Ytskikt på skrivyta	308 109	07350091301092
Ledlist Dag	308 110	07350091301108
Ledlist Natt	308 111	07350091301115
Monterings-kit	308 112	07350091301122
Manual	308 113	07350091301139
Teknisk manual	308 114	07350091301146

Rekonditionerings- dokumentation	308 115	07350091301153
Lathund	308 116	07350091301160
Transportkartong	308 117	07350091301177

Förvaring och transport

Använd den medföljande transportkartongen vid förvaring och transport av MONDIAN Planner för att minska risken för skada.

Om medföljande kartong saknas till förvaring eller transport, se till att använda en kartong som skyddar produkten från stötar.

Risker

- Använd endast den medföljande strömadaptern
- Använd inte mobiltelefon eller annan radiosändare närmare än 40 cm från enheten
- Kvävningsrisk, locket för whiteboardpenna kan skapa en kvävningsrisk, finns det små barn, skall dessa förvaras på ett säkert sätt
- Om du upptäcker att något är skadat eller sitter löst, bör detta åtgärdas innan du använder produkten igen
- Om produkten hängs på vägg, se till att den är ordentligt fastsatt.
- Då produkten har ett blinkande alarm, bör man vara försiktig i det fall användaren, eller människor som vistas



nära produkten har epilepsi, och kan påverkas av det blinkande ljuset.

- Om det spills vätskor, se till att dra ur sladden, och låt enheten vara avstängd i minst 24 timmar.

Hänvisningar till annan dokumentation

Förutom denna bruksanvisning finns även teknisk information till förskrivare.

All dokumentation går att ladda ned i PDF-format ifrån vår hemsida.

Spara denna bruksanvisning så att du alltid har tillgång till den vid behov.

Information om föreskrifter

MONDIAN Planner är registrerad enligt Läkemedelsverkets föreskrifter, samt uppfyller EU-förordningen 2017/745 (MDR), och är testad enligt IEC 60601 samt IEC 61000.

I enlighet med dessa föreskrifter och direktiv är produkten CE certifierad.

MONDIAN Planner är en klass 1 produkt.

Denna produkt är tillverkad i Sverige av MONDIAN AB.





MONDIAN AB

Hultgrens väg 21, 433 38 Lerum

Mail: info@mondian.se, Telefon: 031-470210

Ytterligare information finns på vår hemsida

www.mondian.se.

Återvinning

Produkten innehåller elektronik, och skall lämnas till återvinningsstation.

